

BRUKSANVISNING

till

Cadex Armbandsklocka

Art.nr.: 508 201



Version 18 maj 2006

CE

Innehållsförteckning

| | |
|-------------------------------------|---|
| Inledning..... | 2 |
| Funktioner..... | 2 |
| Klockans fyra huvudmenyer..... | 3 |
| Tid och datum..... | 3 |
| Alarm banken..... | 4 |
| Att inaktivera ett enkelt larm..... | 4 |
| Data banken..... | 5 |
| Aktivera larm..... | 5 |
| Larm..... | 6 |
| Alert knappen..... | 6 |
| Radera Information..... | 6 |
| Övrigt..... | 6 |
| Teknisk specifikation..... | 6 |
| Risikanalys..... | 8 |
| Miljö..... | 8 |

Inledning

CADEX klockan är ett digitalt armbandsur med möjlighet att sätta upp 12 alarm per dygn och lagra elva olika typer av information om användaren av klockan tex. personnr., telefon nummer till anhörig, telefonnummer till läkare mm.

Klockan kan vara ett bra hjälpmedel för den som behöver bli påmind om att medicinen skall tas. Klockan programmeras manuellt.

Funktioner

CADEX klockan har fyra stycken olika knappar för att programmera klockan och en alert knapp för att enkelt visa programmerade alarm och information om användaren.




MODE..... Används för att bläddra mellan klockans fyra huvudsidor och vid programmering av klockan.

- ADJUST**..... Används för att kunna gå in i redigerbart läge för tid, alarm och användarinformation.
- FORWARD** Används för att bläddra stänga av ett larm och vid programmering av klockan.
- REVERSE** Används för att bläddra stänga av ett larm och vid programmering av klockan.
- ALERT** Används för att enkelt visa programmerade alarm och information om användaren.

Klockans fyra huvudmenyer

Klockan har fyra olika lägen: tid och datum, alarm bank, data bank och aktivering av alarm. För att bläddra mellan dessa används MODE knappen.

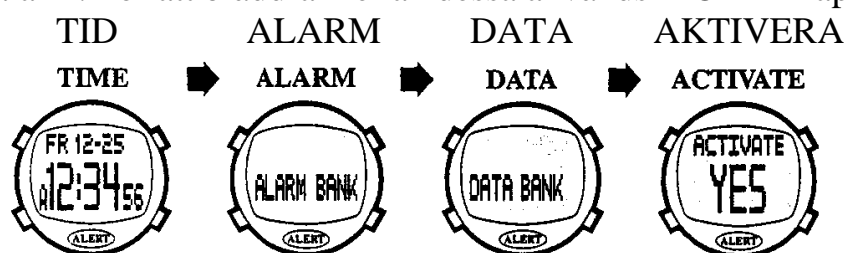

- TIME** Visar datum och tid.
- ALARM** Visar lagrade alarm.
- DATA** Visar information om användaren av klockan.
- ACTIVATE** Huvud aktivering/deaktivering av aktiva alarm.

Tid och datum



När TID läge är valt visas aktuell tid och aktuellt datum. Tiden visas i timmar, minuter och sekunder och datumet visas i år, månad och dag. Efter fem minuter i en av huvudmenyerna kommer klockan automatiskt att gå tillbaka till tidsmenyen om inte inställningsknappen används.

För att ställa in tid och datum:

1. Välj TID läge genom att trycka på MODE knappen en eller flera gånger tills TID läge visas. När TID läget visas håll då ned ADJUST knappen i två sekunder. Tim visaren kommer då att börja blinka.
2. Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att ställa in önskad timme. OBS!
A = AM – förmiddag
P = PM – eftermiddag
3. Tryck MODE knappen för att gå vidare och ställa in minuter.
4. Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att ställa in minuter och sedan MODE för att gå vidare till sekunder.
5. Återupprepa detta förfarande för att ställa in sekunder, år, månad och dag. Klockan beräknar sedan automatiskt vilken veckodag det är.
6. Tryck ADJUST knappen för att acceptera och spara dina ändringar. ADJUST knappen kan användas när som helst för att spara de ändringar som gjorts.

Alarm banken



CADEX klockan kan lagra upp till 12 dagliga alarm. De är numrerade från 1 till 12, de behöver inte vara i kronologisk ordning dvs. alarm 1 behöver inte vara dagens första larm.

Varje larm kan visa en text på upp till 36 tecken.

Ställa in ett alarm:

1. Välj ALARM läge genom att trycka på MODE knappen en eller flera gånger tills "ALARM BANK" visas. Använd nu FORWARD och REVERSE knapparna för att välja det alarm du vill se eller ändra.
2. När du är vid det alarm som du vill ändra, håll då ned ADJUST knappen i två sekunder. Alarm numret (AL1, AL2,...) kommer då att börja blinka. Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att slå av eller på ett alarm. När "((*))" visas på displayen är larmet aktiverat. Tryck MODE knappen för att gå vidare till tidsinställning för alarmet.
3. Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att ställa in den timme larmet skall gå igång. Tryck på MODE knappen för att gå vidare till minuter.
4. Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att ställa in den minut larmet skall gå igång. Tryck på MODE knappen för att gå vidare och ställa in alarmets namn.
5. Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att välja alarm namnets första tecken. TIPS! Håll ner FORWARD eller REVERSE knapparna för att automatiskt bläddra uppåt eller nedåt mellan valbara tecken.
6. Tryck på MODE knappen för att stega fram till alarm namnets andra tecken och ställ in det på samma sätt som beskrivet under punkt 5 ovan. Lag mellanrum på samma sett.
TIPS! För att stega tillbaka till ett tidigare tecken i alarmets namn håll då ned MODE knappen.
7. Återupprepa steg 6 ovan tills alarmets namn är färdig skrivet.
8. Tryck på ADJUST knappen för att spara larm inställningarna och återvända till ALARM BANKEN. Du kan nu välja ett nytt alarm genom att använda FORWARD och REVERSE knapparna eller MODE knappen för att gå vidare till tex. TID läge.

Att inaktivera ett enkelt larm

Man kan inaktivera ett enkelt larm på Cadex:

Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att välja det alarm du vill inaktivera. Håll ned ADJUST knappen i två sekunder. Larmet börjar blinka. Använd FORWARD knappen och slå av larmet. Symbolen "((*))" är då tagit bort från displayen. Tryck ADJUST för att bekräfta.

För att aktivera larmet igen, håll ned ADJUST knappen i två sekunder. Tryck REVERSE och "((*))" visas på displayen. Bekräfta med ADJUST-och larmet är aktiverat.

Data banken



CADEX klockan kan lagra följande information:

NAME Ditt namn och telefonnummer
ALERT Viktig information tex. användarens sjuktilstånd.

ALLERGIC Allergiska reaktioner.

DOCTOR Doktor och telefonnummer.

CONTACT Kontakt person och telefonnummer.

BLOOD Blodgrupp.

BIRTH Personnummer.

INSURER Försäkringsbolag.

POLICY# Försäkringsnummer.

S.S# Social Security nummer.

CARD# Kontokortsnummer och giltighetstid för detta.

Ställa in personlig information:

1. Välj "DATA BANK" läge genom att trycka på MODE knappen en eller flera gånger tills "DATA BANK" visas. Använd nu FORWARD och REVERSE knapparna för att välja den information du vill se eller ändra.
2. När du är vid den information som du vill ändra, håll då ned ADJUST knappen i två sekunder. Första tecknet kommer då att börja blinka. Använd FORWARD och REVERSE knapparna för att ändra tecken. TIPS! Håll ner FORWARD eller REVERSE knapparna för att automatiskt bläddra uppåt eller nedåt mellan valbara tecken.
3. Tryck på MODE knappen för att stega fram till nästa tecken och ställ in det på samma sätt som beskrivet under punkt 2 ovan.
TIPS! För att stega tillbaka till ett tidigare tecken i alarmets namn håll då ned MODE knappen.
4. Återupprepa steg 3 ovan tills informationen är färdig skriven.
5. Tryck på ADJUST knappen för att spara informationen och återvända till DATA BANKEN. Du kan nu välja ny DATA BANK information genom att använda FORWARD och REVERSE knapparna eller MODE knappen för att gå vidare till tex. TID läge.

Aktivera larm



CADEX klockan har en huvudinställning som kan slå av eller på alla aktiverade alarm. Denna kan vara bra att använda om man för en längre tid inte skall använda klockan.

Ställa in huvudlarmbrytaren:

Välj "ACTIVATE" läge genom att trycka på MODE knappen en eller flera gånger tills "ACTIVATE" visas. Använd nu FORWARD och REVERSE knapparna för att välja mellan YES och NO.

NO – Stänger av alla alarm som är aktiverade.

YES – Slår på alla alarm som är aktiverade.

Larm

När ett alarm går igång kommer klockan börja pipa i en minut och alarmet kommer visas högst upp på displayen. Pipandet kan stängas av genom att trycka på FORWARD och REVERSE knapparna. Klockan går nu in i påminnelse läge, dvs. alarm texten visas fortfarande på displayen och klockan ger ifrån sig två pip var tredje minut. Påminnelse läget kan stängas av genom att trycka på FORWARD och REVERSE knapparna. Om flera alarm går igång samtidigt så visas dessa alarm texter om vart annat.

Om flera alarm är i påminnelse läge samtidigt kan det resultera i att klockan piper oftare än var tredje minut.

Alert knappen

Alla inställda alarm och all "DATA BANK" information kan visas genom att trycka på alert knappen upprepade gånger. Den enda information som inte visas är "CARD#" i DATA BANKEN.

Radera Information

Information kan raderas på två olika sätt:

1. Genom att hålla ned alla fyra knappar på sidan av klockan, nollställs hela klockan.
2. Enstaka alarm eller DATA BANK information kan raderas genom att skriva över alarm namnet eller DATA BANK informationen genom att välja det tomma tecknet " " för varje tecken i alarm namnet eller DATA BANK informationen.

Övrigt

Leverantören är inte ansvarig för eventuella skador eller förlorad information till följd av felaktig användning, fel inställning, dåliga batterier eller liknande.

Cadex klockan skall endast användas som ett komplement till eventuella epilepsimärken eller annan medicinsk information och skall inte ersätta dessa. Det kan vara lämpligt att spara en skriftlig kopia av all information som lagras i klockan.

Teknisk specifikation

Batteri CR2032 eller motsvarande.

Batteriets livslängd är ca 1 år, beroende på användning.

Cadex klockan tål vatten, men bör ej användas vid dykning. Inställningsknapparna får inte användas när klockan är i vatten.

Klockan är nickelfri. Baksidan är i rostfritt stål och plast.

Vid allvarlig allergi måste en individuell värdering vidtas.

Cadex armbandsklocka tål vatten från dusch och bad i kar, men ska inte användas vid simhopp och dykning. Inställningsknapparna får **inte användas** när klockan är i vatten.

Risikanalyt

Falck Igel har utarbetat risikanalyt för produkten i enlighet med NS-EN 1441 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utformad med tanke på säkerhetsrekommendationerna som finns i detta dokument.

Vid igångsättning och daglig användning av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. I en bruksanvisning är det inte möjligt att beskriva alla sätt man inte bör använda produkten på. Om du är osäker på om du har satt igång eller ställt in produkten korrekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följskador eller förluster som följer av användning, felaktig användning, bristfällig uppföljning, felaktig inställning, felaktig tillkoppling eller liknande. Falck Igel AB:s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

Miljö

Emballagen är återvinningsbar och lämnas in tillsammans med papper och wellpappavfall. Batteriet lämnas på miljöstation med uppsamling för batterier.

När produkten skall kasseras lämnas den in på kommunal återvinningsstation.

Det är inte tillåtet att kopiera bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse från Falck Igel AB.

Vid frågor eller service av hjälpmedlet ring till Falck Igel på telefon 08 695 69 40

Falck Igel AB

Liljeholmsvägen 30B
S-117 61 Stockholm
Tel.: 08 695 6940
Fax: 08 695 6949

Falck Igel AS, Norge

Buvikveien 22
Postboks 123,
N-4952 Risør
Tlf: +47 37 14 94 50
Telefax: +47 37 14 94 70

E-post:
falckigel@falckigel.se
Hemsida:
www.falckigel.se
