



FALCK IGEL

Kommunikation
Kognition
Larm

BRUKSANVISNING

till

Falck 5005 MinnesKlocka

Art.nr.: 508 400 med vibration och ljud

Art.nr.: 508 401 med ljud

Art.nr.: 508 402 med vibration




Version mars 2006

Vi jobbar med hjälpmedel - det handlar om människor

www.falckigel.se

Introduktion

Minnesklockan är ett kognitionshjälpmedel som hjälper brukaren att komma ihåg och att hantera tid. MinnesKlockan är en bärbar klocka med möjlighet att ställa in 5 larm. MinnesKlockan finns i tre modeller: med vibrator och ljud, med ljud eller bara med vibrator. Klockan är enkel att ställa in. MinnesKlockan med vibration har en rem som gör att klockan kan bäras runt halsen. Remmen är utrustad med säkerhetslås, som automatiskt öppnas om klockan fastnar i något.

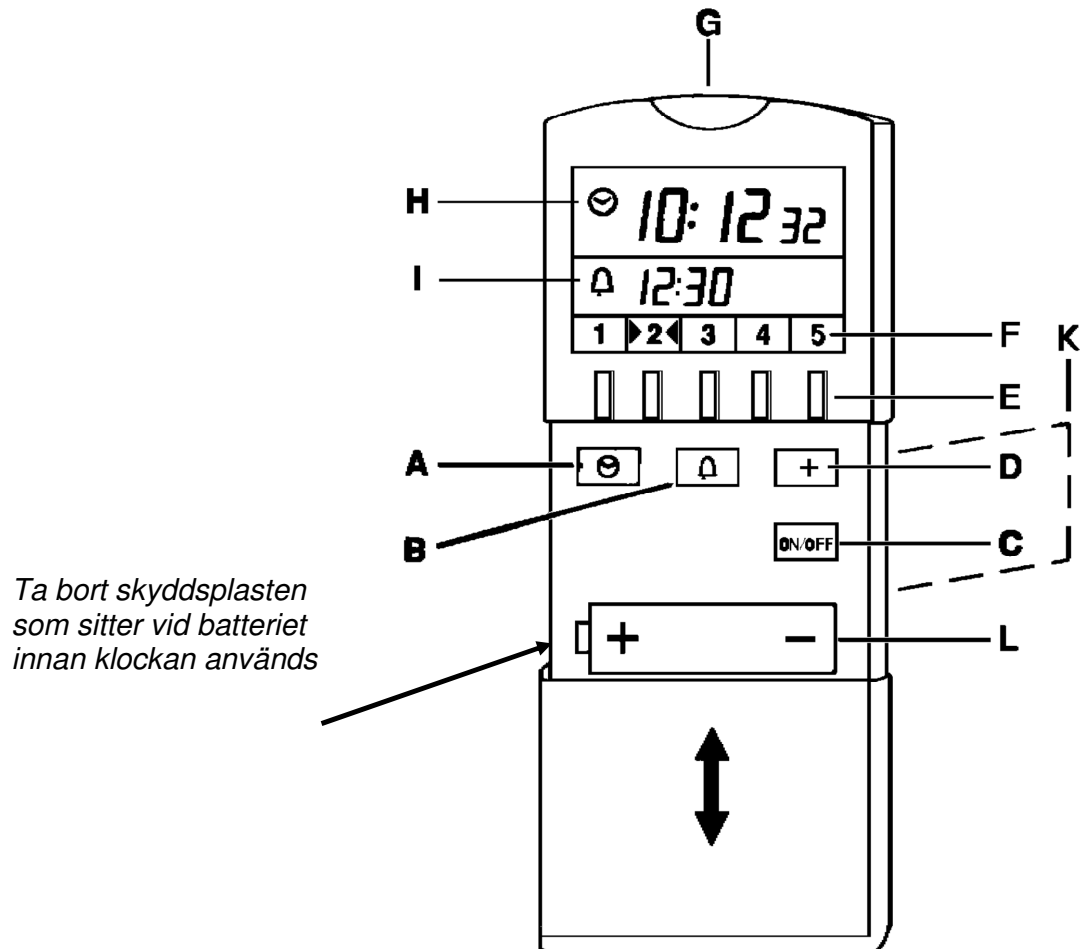

Man kommer åt knapparna A B C D och batteriet genom att dra ner plasthöljet

1. Funktioner och funktionsknappar

A.Knapp för inställning av tiden

B.Knapp för inställning av larm

C.Larm PÅ/AV

D.Tid + vid inställning av tid och larm

E.Larm knappar 1-5

F.Larmindikatorer (Visar aktuellt larm)

G.Knapp för att slå av larmet

H.Aktuell tid

I.Tid för nästa larm

J.Bordsstöd (På baksidan av klockan – Dra ner plasthöljet, ta fram bordsstödet och skjut tillbaka höljet .

K.Batteri (1.5V R6 Batteri).

2. Tidsinställning

- Tryck på knapp A (Symbolen för klockan blinkar)
- Ställ in rätt tid med hjälp av knapp D (+).
(Ett tryck är en minut, hålls knappen nere löper tiden)
- Tryck på knapp A för att starta klockan.
(Den startar också av sig själv efter ca 10 sekunder)

3. Inställning av de 5 larmtiderna

- Tryck på knapp B (Symbolen för larm blinkar)
- Tryck på önskat larm (Välj mellan knapp 1-5 på raden (E))
- Ställ in önskad larmtid med hjälp av knapp D (+).
(Ett tryck är en minut, hålls knappen inne löper tiden)
- Tryck på knapp B igen för att aktivera inställningen.
(Den startar också av sig själv efter ca 10 sekunder)

Viktigt

Larmet på nr 1 varar i 2 minuter (T.ex. väckning på morgonen)
De övriga 2-5 larmar i 20 sekunder om de inte slås av med (G)

Larmtiden i displayen (I) visar bara nästkommande larm.
(Se punkt 7)

4. Ta bort ett larm

- Tryck på knapp B (Symbolen för larm blinkar)
- Tryck på det larm som ska tas bort under E (1-5)
- Tryck och håll knapp D (+) tills "OFF" står i displayen (kommer vid 00.00)
Larmet är nu av.

5. Stoppa larmsignalen

- Tryck på knapp G på toppen av MinnesKlockan.
Larmet stannar och nästa larm syns i displayen.
-

6. Slå PÅ/AV larmfunktionen

- Knapp C slår PÅ och AV larmfunktionen med vartannat tryck

7. Se de inställda larmen

- När man trycker och håller ned en av knapparna under E (1-5) ser man inställd larmtid i displayen.

8. Batteribyte

Om en batterisymbol syns till höger om larmtiden måste batteriet bytas.
Kontrollera i batteriluckan att batteriet är riktigt isatt. Det finns en + och – symbol i höljet

9. Minnesklocka med vibrator

- Vibratorn kommer att vibrera lika länge som larvet piper (om man har modellen med både vibration och ljud)
- Det är viktigt att minnesklockan med vibration är placerad nära kroppen så man känner vibrationerna vid larm
- Snöret som sitter på minnesklockan med vibration kan användas för att hänga den runt halsen. Prova dig fram till bästa resultat.

OBS!

om en klocka med vibration står på ett plant underlag kan den flytta sig vid larm. Se till att den inte kan falla och gå sönder.

Säkerhet

Falck Igel har utarbetat en riskanalys för produkten med hänvisning till **NS-EN 1441 for Medisinsk utstyr**. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som är gjorda i detta dokument. Vid idrifttagning och dagligt bruk av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du har tagit i drift eller ställt in produkten korrekt önskar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB's ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

Miljö

Emballagen är återvinningsbar och lämnas in tillsammans med papper och wellpappavfall.

Batteriet lämnas på miljöstation med uppsamling för batterier.

När produkten skall kasseras lämnas den in på kommunal återvinningsstation.

*Det är inte tillåtet att kopiera
bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse
från Falck Igel AB.*

**Vid frågor eller service av
hjälpmedlet ring till Falck Igel på
telefon 08 695 69 40**

Falck Igel AB

Liljeholmsvägen 30B
S-117 61 Stockholm
Tel.: 08 695 6940
Fax: 08 695 6949

Falck Igel AS, Norge

Buvikveien 22
Postboks 123,
N-4952 Risør
Tlf: +47 37 14 94 50
Telefax: +47 37 14 94 70

E-post:
falckigel@falckigel.se
Hemsida:
www.falckigel.se
