

BRUKSANVISNING

för

Falck 5141 Sigvart Dygnstavla

Art.nr.: 508 701



Version 2 oktober 2008



Innehållsförteckning

Falck 5141 Sigvart Dygnstavla	3
Tavlans baksida	3
Beskrivning.....	4
Montering	4
Dag och natt	4
Visning av tid som ljuspelare eller ljuspunkt.....	5
Inställning av ljusstyrka	5
Digital visning av tid.....	5
Att ställa klockan	6
Så ställer du klockan	6
Larminställning	6
Kvittering av alarm	7
Kontrollera larminställningar	7
Radera larm	8
Att välja bort blinkande lampa vid larm.....	8
Larm utgång – vidarekoppling av larm.....	8
Vidarekoppling av larm.....	9
Ändring av tid för dag och natt	9
Tillbehör	10
Tekniska specifikationer	11
Utgång till vidarekoppling av larm	11
Förvaring.....	11
Skötsel	11
Säkerhet	12
Risikanalys.....	12

Falck 5141 Sigvart Dygnstavla

Levereras med följande utrustning:

- Whiteboard-tusch
- Magnetisk tavsudd
- Magneter med färger
- Symboler
- Skruvar/murplugg
- Rengöringsmedel för whiteboardtavla
- Idèhäfte

Tavlans baksida

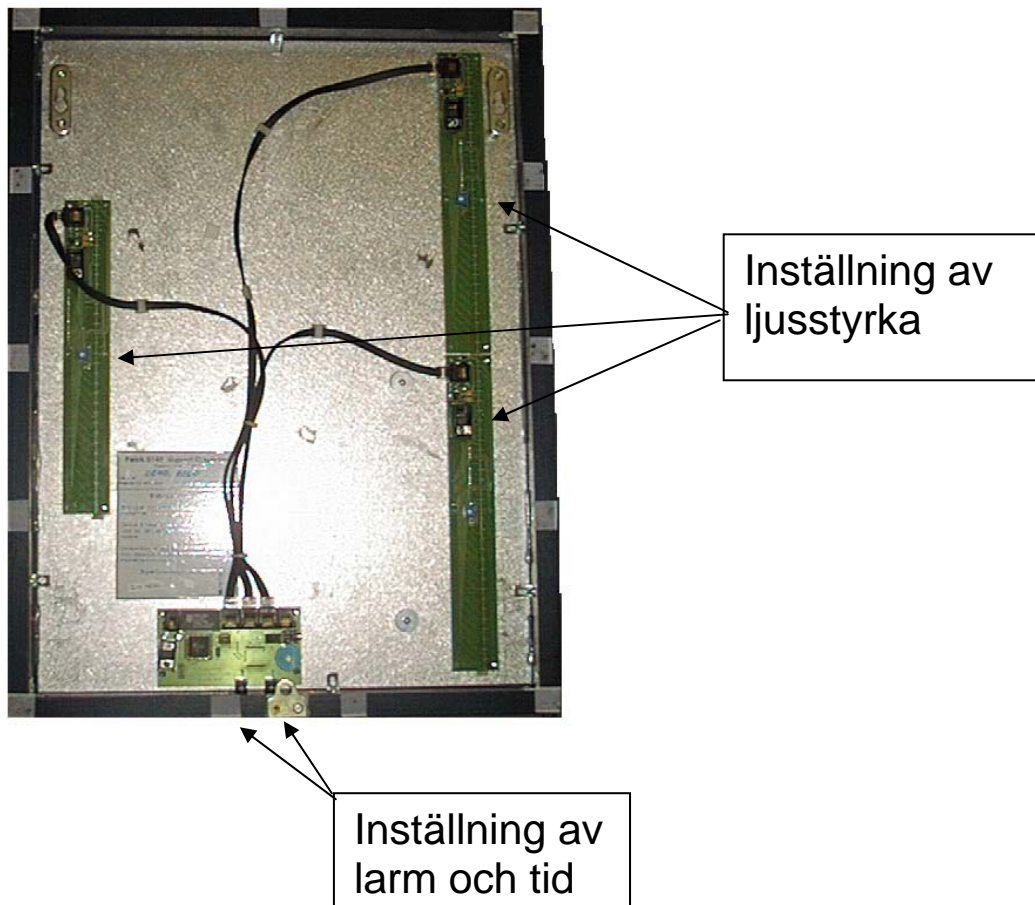


Bild 1

Beskrivning

Falck 5141 Sigvart Dygnstavla är en elektronisk stationär dygnsgsplantavla för brukare som har behov av att strukturera dagen och göra den mer förutsägbar, genom att fästa symboler, magneter, bilder, klistermärken, färgad tejp och färgkoder för att planera dagen. Whiteboardtusch kan också användas i planeringen OBS! Använd inte annan typ av tuschpenna! På Falck 5141 Sigvart Dygnstavla är det också möjligt att ställa in ett larm för varje kvart (var 15- minut) så att brukaren blir påmind när en tidpunkt med aktivitet inträffar. Larm kan vidarekopplas till ringklocka, personsökare eller (mobil)telefon. Se Idèhäfte för bra tips till användning av Sigvart Dygnstavla.

Montering

Sigvart Dygnstavla fästs på väggen med de medföljande skruvarna.

Sätt stickkontakt i elurtaget. Tavlan måste hela tiden vara kopplad till elnätet. Om strömmen försvinner, kommer klockan fortsätta att gå, men ljuspelaren kommer inte att lysa förrän strömmen är tillbaka. Sigvart Dygnstavla ställer då in sig automatiskt på rätt tid.

Innställningar, regleringar och tillkopplingar görs på baksidan av tavlan innan den fästs på väggen.

Unnntag är inställning av tid och larm.

Dag och natt

Till vänster på tavlan visas dagen från kl. 07.00 till kl. 23.00 med rött ljus. Till höger visas natten från kl. 23.00 till 07.00 med blått ljus. Det är möjligt att ändra tiden för när det är dag och när det är natt. Se avsnitt om ”Ändring av tid för dag och natt”.

Visning av tid som ljuspelare eller ljuspunkt

Med hjälp av en lysande pelare som töms med ett ljus varje kvart eller en lysande punkt som flyttar sig nedåt, kan man se var på dagen man är. Dessa två funktioner - pelare eller lysande punkt - är valfria och kan ställas in med brytare nr. 1 på tavlans baksida (se bild 2).

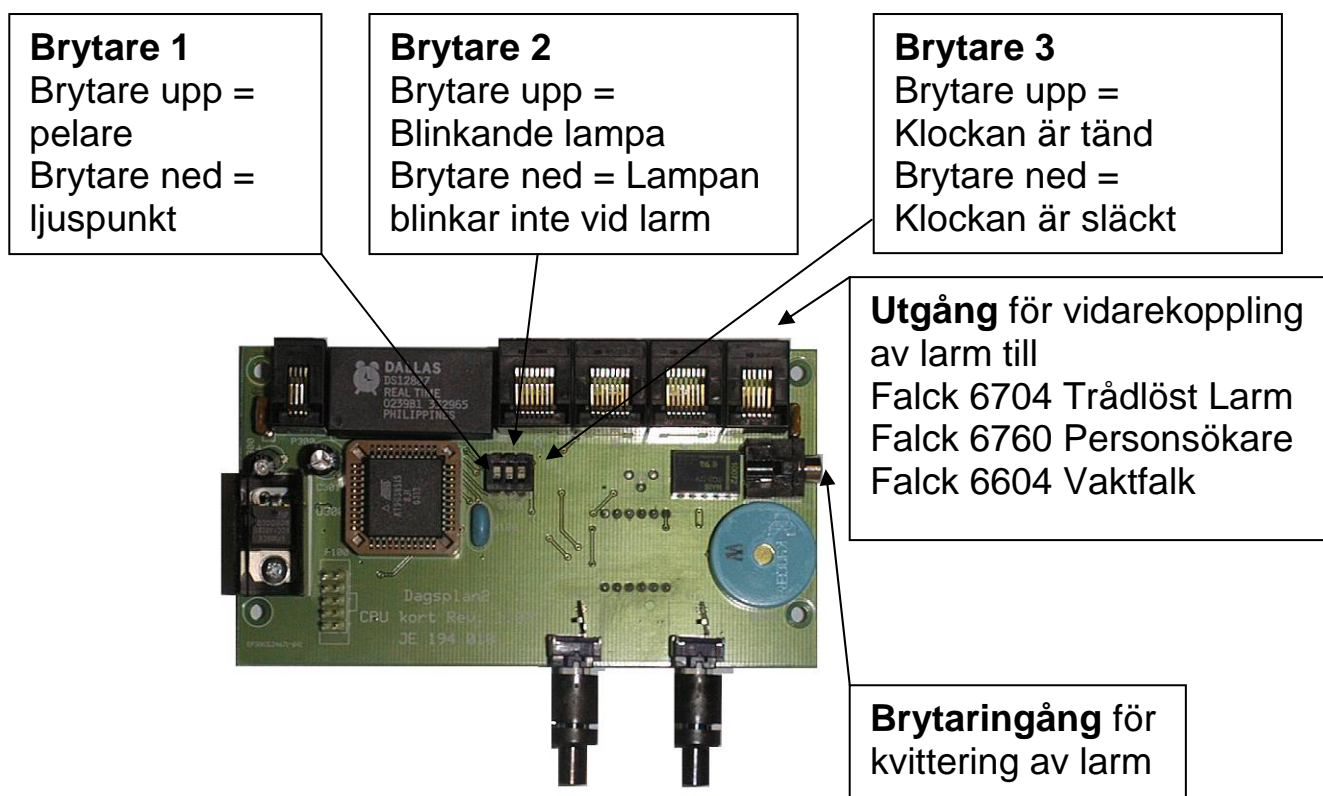


Bild 2

Inställning av ljusstyrka

Det är möjligt att reglera ljusstyrkan till lampan på Sigvart. Ljusstyrkan kan regleras individuellt för dag och natt. Detta görs med en liten skruvmejsel på inställningsskruvarna som finns på mitten av vart av de tre kretskorten med lampor (se bild 1).

Digital visning av tid

Längst ned på Sigvart finns en digital klocka. Man kan välja om den skall visas eller inte genom att ställa brytare nr.3 (se bild 2) på baksidan av Sigvart.

Att ställa klockan

Att ställa klockan är särskilt viktigt i samband med övergång från sommar- och vintertid. Det kan också vara aktuellt om man önskar att ändra tiden för vad som är definierat som natt och dag på Sigvart. Se eget avsnitt ”Ändring av tid för dag och natt”.

Så ställer du klockan

- a) Gå in i tidsinställning genom att hålla inne TID knappen i 2 sekunder. Tid och larm knapp sitter på tavlans underkant.
- b) ”Timer” blinkar och kan justeras upp genom att trycka på LARM knappen. Genom att hålla knappen inne i mer än 0,8 sek kommer timmarna löpa.
- c) Tryck på TID för att gå över till minuter som justeras genom att trycka på LARM knappen. Genom att hålla knappen inne i mer än 0,8 sek kommer minuterna löpa.
- d) Gå ur tidsinställning genom att hålla inne TID knappen i 2 sekunder (automatisk time out efter 1 minut)

Larminställning

Sigvart Dygnstavla har möjlighet till larm varje kvart hela dygnet. Larmen presenteras i form av ljud och genom att ljuspricken på aktuell tidpunkt blinkar. Alla larm är dagliga, dvs. de kommer igen varje dag.

Här är sätten att göra det på:

- 1) För att komma in i programmeringsmodus tryck och håll ned LARM brytare i 2 sek. Efter dessa 2 sek. släcks alla ljusdioder i pelaren förutom de som redan är inställda med larm. Dessa ljusdioder kommer lysa utan att blinka.
- 2) Översta lysdioden (kl. 07.00) är den som kan ställas in först. Genom att trycka på TID går markören ”in” på kl 07.00. Står markören på ett fält där larm inte är ställt blinkar den med lugnt tempo. Står den på ett fält med ställt larm blinkar den fortare. Tryck på LARM brytaren

för att växla mellan larm av eller på. När man sätter ett larm kommer man att få ett pip och lampan blinkar fortare. Displayen (klockan) är alltid tänd i programmeringsmodus.

- 3) TID brytaren trycks på för att gå till nästa lysdiod där man kan ställa in larm, och larmstatus visas motsvarande för denna.
 - a) Föregående lysdiod kommer att visa vald larminställning (ljus av = inget larm, ljus på = larm aktiverat). Max 96 larm kan ställas in (en för varje lysdiod).
- 4) Genom att hålla TID inne i mer än 0,8 sek kommer markören löpa.
- 5) För att gå ur programmeringsmodus tryck på LARM brytaren i 2 sek. Om inte brytaren trycks ned inom 1 minut går Sigvart automatisk ur programmeringsmodus.

Kvittering av alarm

När det kommer ett larm kommer larmljuden vara i 15 sekunder. Larmen kan kvitteras på tre olika sätt:

- 1) Automatisk. Vänta i 15 sekunder och larmen kvitteras automatiskt.
- 2) Det är också möjligt för brukare att kvittera larmen innan det har gått 15 sekunder. Då måste det kopplas på en egen kvitteringsbrytare. Det kan vara vilken brytare som helst med 3,5mm monoplugg. Kontakta Falck Igel för val av brytare. Brytaren pluggas in på baksidan av Sigvart som visas på bild 2.
- 3) Som tillägg kan larmen kvitteras genom att man trycker på LARM knappen.

Kontrollera larminställningar

Inställda larpunkter visas inte i normalposition (användarmodus). För att kunna se inställda larmtider måste LARM knappen hållas inne i 2 sekunder (programmeringsmodus). Gå ur genom att trycka på samma knapp igen i 2 sekunder.

Radera larm

För att radera enkelt larm används samma tillvägagångssätt som för att ställa in ett larm. Se avsnitt om Larminställning ovan.

Man kan också radera alla larm på en gång :

- 1) Gå in i programmeringsmodus genom att trycka och hålla LARM brytaren i 2 sek.
- 2) Tryck och håll båda brytarna inne i 1 sek. Då hörs en kvitteringston på 2 sekunder och alla larm raderas.
- 3) Gå ur programmeringsmodus igen genom att trycka på LARM brytaren i 2 sek (eller vänta i 1 minut så går Sigvart automatiskt över till Användarmodus).

Att välja bort blinkande lampa vid larm

Några brukare vill kanske att lampan för aktuell tidpunkt inte skall blinka samtidigt som larmljudet kommer. Denna funktion kan stängas av med en brytare på baksidan av Sigvart. Se bild 2 (brytare nr.2).

Larm utgång – vidarekoppling av larm

Vid några tillfällen kan det vara önskvärt att få larm på andra ställen i boendet så att brukaren får meddelande omedelbart när en tidpunkt med larm inträffar. Då kommer brukaren kunna gå till Sigvart Dygnstavla för att få information. Till Sigvart Dygnstavla kan kopplas:

- Falck 6704 Trådlöst Larm. Denna består av en sändare som kopplas till utgången bak på Sigvart (se bild) och en mottagare som placeras i ett annat rum. Det är möjligt att ha mottagare i flera rum. Räckvidd upp till 50m.
- Falck 6760 Personsökare. Denna består av en sändare som kopplas till utgången bak på Sigvart (se bild) och en mottagare som brukaren kan ta med sig. Räckvidd upp till 500m.
- Falck 6604 Vaktfalk Telelarm. För överföring av larm till telefon eller mobiltelefon.

Vidarekoppling av larm

Larm kan vidarekopplas till ringklockor, personsökare eller via en Vaktfalk Telelarm till (mobil)telefon.

Tillkoppling görs på tavlans baksida:



För att använda tillkopplat larm, följ larmets bruksanvisning.

Ändring av tid för dag och natt

Sigvart Dygnstavla är normalt inställd till att visa dagen mellan 7 på morgonen och 23 på kvällen. Natten pågår från 23 på kvällen till 7 på morgonen. Det är möjligt att ändra detta genom att sätta på en av tre magnetremsor med olika tryck (se under Tillbehör).

Exempel : Man vill att dagen skall börja kl.8 och sluta kl.24. Natten är då motsvarande mellan 24 till 8.

- 1) Klipp till aktuell magnetremsa (med 24- timmarsvisning eller visning av analoga klocksymboler) så att kl.8 på morgonen fysiskt kommer där det står 7 på tavlan)
- 2) Om tidsangivelsen ej behövs så används de vita magnetremsorna för att täcka detta på tavlan.
- 3) Gör motsvarande för natten
- 4) Ställ klockan på Sigvart Dygnstavla en timma tillbaka i förväg till korrekt tid.

Tillbehör

- 500 705 Tillbehörsset till Sigvart
- 500 703 Kognitivt anpassningsmaterial till Sigvart
- 500 706 Magnetband med klocksymboler(analog tidvisning)
- 500 707 Magnetband med 24-timmars visning
- 500 708 Magnetband utan text (för att dölja information)
- 320 818 Falck 6904 Trådlöst Larm, för vidarekoppling av larm
- 330 801 Falck 6760 Personsökare, för vidarekoppling av larm
- 300 800 Falck 6604 Vaktfalk Telelarm, för vidarekoppling av larm
- 628 xxx Valfri manöverkontakt (kontakta Falck Igel)


Se ytterligare beskrivning i Idèhäftet.

Tekniska specifikationer

Storlek (hxbxd): 612 x 462 x 40 mm
Vikt: 5 kg
Strömförsörjning: 12VDC/0.8A (medföljer)
Använd endast original strömförsörjning!

Utgång till vidarekoppling av larm

Utgången bak på Sigvart Dygnstavla är en normal öppen, stängd, spänningsfri relä utgång. Själva kontakten är en 6 pins modularkontakt. Reläet är aktivt i 2 sek.

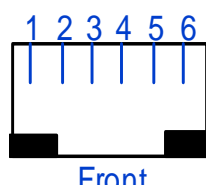

1	GND
2	NO1
3	Com1
4	NC1
5	NC2
6	+12V (Com2)

Förvaring

Tavlan bör förvaras liggande, torrt och ej i kyla.

Skötsel

Tavlan rengörs med vanlig magnetisk taveludd. Kan också rengöras med whiteboard rens, om tuschen sitter länge kan det vara svårt att ta bort. Använd endast whiteboardtuscha!

Säkerhet

Rengöringsmedlet är skadligt vid inandning, hudkontakt och sväljning. Bör förvaras på ett säkert ställe. Vid direktkontakt, skölj grundligt med vatten. Vid sväljning: Ring läkare eller giftinformationscentralen, tel.: (08) 33 12 31 (om akut tel.:112).

Risikanalyis

Falck Igel har utarbetat riskanalys för produkten i enlighet med NS-EN 1441 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utformad med tanke på säkerhetsrekommendationerna som finns i detta dokument.

Vid igångsättning och daglig användning av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. I en bruksanvisning är det inte möjligt att beskriva alla sätt man inte bör använda produkten på. Om du är osäker på om du har satt igång eller ställt in produkten korrekt rekommenderar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förluster som följer av användning, felaktig användning, bristfällig uppföljning, felaktig inställning, felaktig tillkoppling eller liknande. Falck Igel AB:s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

Det är inte tillåtet att kopiera bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse från Falck Igel AB.

Vid frågor eller service av hjälpmedlet ring till Falck Igel på telefon 08 695 69 40

Falck Igel AB

Liljeholmsvägen 30B
S-117 61 Stockholm
Tel.: 08 695 6940
Fax: 08 695 6949

Falck Igel AS, Norge

Buvikveien 22
Postboks 123,
N-4952 Risør
Tlf: +47 37 14 94 50
Telefax: +47 37 14 94 70

E-post:
falckigel@falckigel.se
Hemsida:
www.falckigel.se
