

# Bruksanvisning till **PARTNER 4/Plus**

Art.nr: 463406



Version juli 2009

## Lycka till med din Partner 4

Partner 4 är ett enkelt kommunikationshjälpmedel som designats för att vara pålitligt, av god kvalitet för att tåla flera års användning.

### Egenskaper för Partner 4:

- Skyddad mot stötar och tål hård behandling.
- Vattentålig, underlättar rengöring
- Inkapslingen är gjord av kraftig och stöttåligplast.
- Bärbar och lätt
- Inspelat tal kan lagras över lång tid, även utan ström
- Partner 4 har inbyggd mikrofon, 4 högtalaringångar och 4 högtalarutgångar
- 2 nivåer med möjlighet för 4 inspelade meddelanden på varje nivå.
- Utskivningsbara överlägg.

### Medföljer produkten:

- Partner 4
- Tech Overlay Designer CD. **OBS!** Tech Overlay Designer är inte Windows Vista kompatibel.
- Bruksanvisning (denna)
- Batterier, 4 st LR03 Alkaline batterier

## Användning:

Partner 4 är enkel att använda. Det är bara att skruva på den och justera volymen i önskad nivå och trycka på önskad bild, det inspelade meddelandet kommer då att spelas upp.

Alla inställningar och inkopplingar är placerade på baksidan av Partner 4.

På Partner 4 kan det spelas in och spelas upp 4 meddelanden på varje nivå.

Varje meddelande kan vara upp till 6 sekunder. Överläggen (bildkorten) kan lätt bytas ut genom att trä dem genom springan på sidan mellan fingerguiden och apparaten.

## Batteri byte

1. Kontrollera att Partner 4 är avstängd. Skruva VOLYMEN moturs tills ett klick hörs.
2. Vänd på Partner 4 och lägg den med fronten ned emot ett plant underlag.
3. Skruva av batterilocket nederst i vänstra hörnet.
4. Avlägsna de gamle batterierna. Använda batterier får inte kastas tillsammans med vanligt avfall.
5. Sätt i 4 nya batterier. Se till att batterierna placeras rätt med polariteten.
6. Skruva på batterilocket och se till att det skruvas på ordentligt.

## Spela in meddelande:

**OBS!** Det är viktigt att den inbyggda mikrofonen på baksidan inte är övertäckt vid inspelning.

1. Slå på Partner 4. Skruva VOLYMEN medurs tills det hörs ett klick och skruva den vidare till den står i mittposition.
2. Tryck och håll både REC-knappen (se bilden nedanför) och meddelandefältet som det skall spelas in ett meddelande på intryckta.
3. Prata in i den inbyggda mikrofonen, vid sidan av REC-knappen, med ett avstånd på 15 – 20 cm. Inspelningen bör göras i ett rum med lite bakgrundsljud.
4. Detta måste göras för alla 4 meddelandefälten på bägge nivåerna.

## Ingångar och utgångar


Partner 4 har 4 ingångar och 4 utgångar, märkta J1, J2, J3 och J4. Dessa korresponderer med de 4 meddelandefälten.

### Ingångar

De 4 ingångarna (INPUT) J1, J2, J3 och J4 på baksidan av Partner 4 (se bilden nedanför) är direkt kopplade till motsvarande meddelandefält. J1 är kopplat till meddelandefältet på vänster sida. J2 är kopplat till meddelandefältet nr 2 från vänster o.s.v. När en manöverkontakt, som är kopplat till en av ingångarna, trycks in kommer meddelandet i det motsvarande meddelandefältet att spelas upp.

### Utgångar

De 4 utgångarna (OUTPUT) J1, J2, J3 och J4 på baksidan av Partner 4 (se bilden nedanför) är slutande kontakter och kan användas för att manövrera en ansluten utrustning exempelvis en batterileksaker som kan aktiveras av en manöverkontakt. När ett meddelandefält trycks ner kommer tillhörande utgång att stängas och aktivera den anslutna utrustningen.

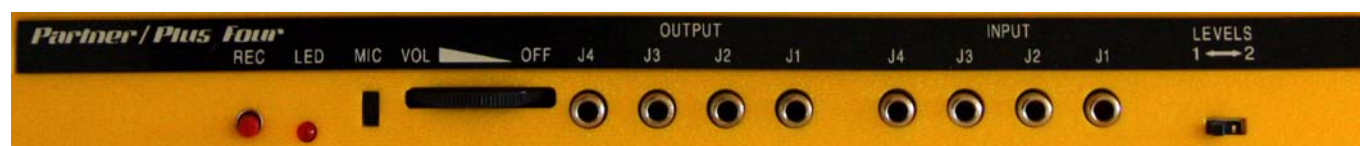

Baksidan

## Spela upp meddelande

1. Slå på Partner 4. Skruva VOLYMEN medurs till det hörs ett klick och skruva den vidare till önskad ljudnivå.
2. Tryck på önskat meddelandefält och det inspelade meddelandet spelas upp.

## Val av nivå

Det är 2 nivåer på Partner 4.

1. För att välja nivå 1, skruva brytaren på baksidan, märkt LEVELS, till 1.
2. För att välja nivå 2, skruva brytaren på baksidan, märkt LEVELS, till 2.

## Överlägg

Det finns flera olika sätt att tillverka överlägg på till Partner 4.

1. Teckna eller skriv på ett ark som är 7,3 X 32 cm. Passa in varje fält så de passar till meddelandefälten på Partner 4.
2. Tillverka egna överlägg med Tech Overlay Designer programvara.
3. Tillverka egna överlägg med Mayer Johnson's BOARDMAKER™ programvara.

## Underhåll

Partner 4 går automatisk i viloläge efter att ett meddelande har spelats upp. Viloläge är ett aktivt läge som drar lite ström från batterierna. Därför bör Partner 4 stängas av om den inte ska användas på en längre tid. (2 – 3 timmar).

Om Partner 4 inte fungerar alls eller om den inte fungerar som den ska:

1. Kontrollera att batterierna sitter i rätt.
2. Kontrollera att Partner 4 är påslagen och att det finns inspelade meddelanden. Kontrollera också att det inte är något som hindrar tryckning på meddelandefälten.
3. Stäng av Partner 4 och låt den vara i 15 sekunder, slå på den igen och spela upp ett meddelande.
4. Byt ut batterierna.
5. Hjälper inget av punkterna ovan kontakta Falck Igel tlf. 08-6956940

## Säkerhet

Falck Igel har utarbetat en riskanalys för produkten med hänsyn till NS-EN 1441 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikationer är utarbetade med tanke på säkerhetsvärderingarna som är gjorda i detta dokument..

Vid driftsättning och daglig användning av produkten är det alltid viktigt att på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du tvivlar på att du har tagit produkten korrekt i drift eller ställt in den rätt rekommenderar vi dig att ta du ta kontakt med din leverantör

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följskador eller förlust till följd av användning, fel användning, bristande uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB´s ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

---

*Det är inte tillåtet att kopiera bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse från Falck Igel AB.*

**Vid frågor eller service av hjälpmedlet ring till Falck Igel på telefon 08 695 69 40**

---

### Falck Igel AB

Liljeholmsvägen 30B  
S-117 61 Stockholm  
Tel.: 08 695 6940  
Fax: 08 695 6949

### Falck Igel AS, Norge

Buvikveien 22  
Postboks 123,  
N-4952 Risør  
Tlf: +47 37 14 94 50  
Telefax: +47 37 14 94 70

**E-post:**  
falckigel@falckigel.se  
**Hemsida:**  
www.falckigel.se

---