

Bruksanvisning till Smart/Speak 32x6

Art.nr: 463801



Version november 2009

Innehåll

Lycka till med din Smart/Speak 32x6	4
Egenskaper för Smart/Speak 32x6	4
Produkten levereras med	4
Användning	4
Inbyggt uppladdningsbart batteripaket	5
Spela in meddelande	5
Master radering	5
Hålmönster för de olika nivåerna	6
Överlägg	6
Rengöring	6
Skötsel	7
Tech Overlay Designer og Tech/Syms Series I, II & III	7
Installation av Tech Overlay Designer	7
Installation Tech/Syms Series	7
Starta programmet	8
Välj en mall	8
Lägga in en symbol eller bild i ett av fälten på överlägget	8
Ändra bakgrundsfärg	9
Ändra storleken eller rotera en bild/symbol	9
Ändra placeringen av en bild, symbol eller text	9
Ändra teckensnittet	9
Ändra placeringen av texten i textfältet	9
Ändra visningsstorleken på överlägget	9
Radera en bild/ symbol eller text	10
Skriva ut ett överlägg	10
Spara överlägget	10
Öppna ett överlägg	10
Laminera ett överlägg	10
Säkerhet	12

Lycka till med din Smart/Speak 32x6

Smart/Speak 32x6, ett enkelt flernivåskommunikationshjälpmedel som är designat för att vara pålitligt och av god kvalitet. Detta för att Smart/Speak 32x6 ska tåla många års användning.

Egenskaper för Smart/Speak 32x6

- Enkelt att byta överlägg.
- Allt inläst tal blir lagrat på ett externt minneskort. Varje minneskort kan innehålla inläst tal för 6 nivåer med 32 meddelanden per nivå.
- Varje inläst meddelande kan vara upp till 10 sekunder, inspelningstiden blir kontrollerad med den inbyggda "TIME-LOCK."
- Alla inställningar är dolda bakom ett lock på baksidan av apparaten.
- Apparaten är utrustad med ett handtag och en bärrem för att underlätta att ta den med sig.
- Inbyggd uppladdningsbara batterier
- Fukttålig, underlättar vid rengöring.
- Skyddad emot stötar, tål hård behandling.
- Inkapslingen är gjord av kraftig stötsäker plast.
- Bärbar och lätt.
- Indikator för låg batterinivå.
- Smart/Speak 32x6 har inbyggd mikrofon och högtalare, samt möjlighet för anslutning av extern högtalare och inspelningsbrytare.

Produkten levereras med

- Smart/Speak 32x6
- Laddare
- Bärrem
- Håltagare
- Resource CD 2009 med Tech Overlay Designer.
OBS! Tech Overlay Designer är inte Windows Vista kompatibel.
- Överläggsmall
- Bruksanvisning (denna).

Användning

Alla inställningar är placerade under ett lock på baksidan av apparaten.

Med Smart/Speak 32x6 kan man spela upp 192 inspelade meddelanden, fördelade på 6 nivåer. Varje meddelande kan vara upp till 10 sekunder. Smart/Speak 32x6 är enkel att använda. Det är bara att slå på den, justera volymen, sätta in önskat överlägg och trycka på det meddelandefält som önskas.

Inbyggt uppladdningsbart batteripaket

Det inbyggda uppladdningsbara batteripaketet ger ca 8 timmars normal användning. Det tar ca 4 timmar att fulladda batteripaketet.


Batteripaketet måste vara fulladdat innan att Smart/Speak 32x6 ska kunna tas i bruk första gången.

1. Ladda batteripaket genom att plugga i strömförsörjningen i en stickkontakt.
2. Sätt den andra änden in i kontakten märkt "CHARGE", på baksidan av apparaten.
Laddningsdioden lyser rött under laddning.
3. När laddningsdioden lyser grönt, är batteripaketet fulladdat.
4. Det rekommenderas att apparaten laddas varje natt.

Spela in meddelande

OBS! Det är viktigt att mikrofonen, nere i högra hörnet av fronten, inte är övertäckt under inspelning av meddelande.

1. Innan inspelning av meddelande på en ny nivå, rekommenderas det att man gör en master borttagning. Se nästa kapitel hur man gör detta.
2. Sätt in önskat överlägg med utstansade hål för den nivå som det ska spelas in meddelande på. Se översikt för hålmönster för de olika nivåerna nedanför.
3. Lyft locket på apparatens baksida. Skruva VOLYM brytarhjulet mot vänster till önskad ljudnivå.
4. Tryck och håll REC-knappen nedtryckt, den måste vara nedtryckt under hela inspelning av meddelandet. En extern inspelningsbrytare kan anslutas till brytaringången på baksidan, märkt EXT REC.
5. Tryck på ett av de 32 meddelandefälten, när REC LED börjar att blinka kan meddelandet läsas in. Tala med en tydlig och klar stämma i mikrofonen, som är placerad nere till höger på apparatens framsida.
6. När du är färdig med att läsa in meddelandet, släpps REC-knappen eller brytaren som är ansluten till EXT REC ingången.
7. Upprepa samma procedur för de resterande meddelandefälten på nivån.

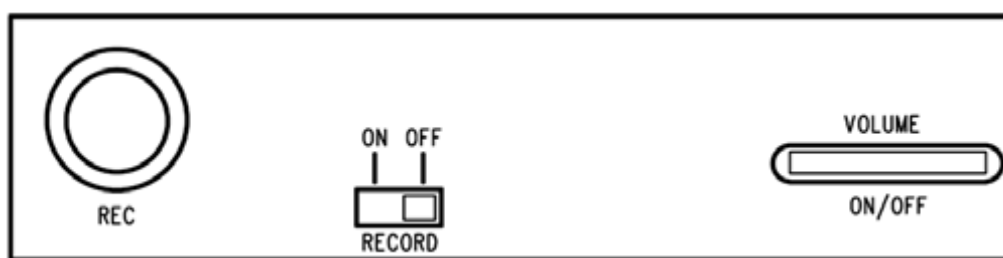

UNDER LOCKET PÅ BAKSIDAN

Master radering

Vid Master borttagning kommer endast meddelanden på den aktuella nivån att raderas. Meddelanden på andra nivåer kommer inte att raderas.

1. Stäng av Smart/Speak 32x6 genom att skruva VOLYM brytarhjulet mot höger till dess att det hörs ett klick.
2. Sätt in överlägget tillhörande den nivå som ska raderas. Se översikt för hålmönster för de olika nivåerna nedanför.
3. Tryck och håll nere REC-knappen. Den måste hållas nere hela tiden under radering.
4. Skruva VOLYM brytarhjulet mot vänster till dess att det hörs ett klick.
5. Ljuddioden REC LED kommer nu att lysa rött. När REC LED efter ca 10 sekunder börjar blinka, släpps REC-knappen. Alla meddelanden på den aktuella nivån är nu raderade.

Hålmönster för de olika nivåerna

Mallar för Mayer-Johnson Boardmaker kan laddas ner från vår hemsida www.falckigel.se under Ladda ned.

Hål	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6
1	●	○	○	●	○	●
2	○	●	○	○	●	●
3	○	○	●	●	●	●

Nivå 1 – hål 1
Nivå 2 – hål 2
Nivå 3 – hål 3
Nivå 4 – hål 1 och 3
Nivå 5 – hål 2 och 3
Nivå 6 – hål 1, 2 och 3

Spela upp meddelande

Om det ska användas en extern högtalare, ansluts den till utgången märkt EXT SPK.

1. Lyft locket på baksidan av Smart/Speak 32x6. Skruva VOLYM brytarhjulet mot vänster till önskad ljudnivå.
2. Sätt in önskat överlägg med hålen för nivån utstansade. Se översikt för hålmönster för de olika nivåerna ovan.
3. Tryck på önskat meddelandefält.

Överlägg

Överlägg skiftas genom att trä dem i öppningen på högra sidan av Smart/Speak 32x6. Nya överlägg kan tillverkas på flera olika sätt:

1. Teckna eller skriv på ett ark som är 15,2 x 34 cm. Placera varje fält så att det passar in i de 32 öppningarna på Smart/Speak 32x6.
2. Gör dina egna överlägg med Tech Overlay Designer och Tech/Syms symboler. Blanka mallar ligger på RESOURCE CD 2009.
3. Tillverka dina egna överlägg med Mayer-Johnson Boardmaker. Boardmaker måste köpas separat. Blanka mallar kan laddas ned från vår hemsida www.falckigel.se under Ladda ned.

Rengöring

OBS! Doppa inte ned Smart/Speak 32x6 under vatten eller spruta vatten direkt på brytaringångarna, högtalarutgången, de interna högtalarna eller på de extern högtalarna.

Smart/Speak 32x6 är motståndskraftig emot vattenstänk, men den är inte vattentät.

1. Stäng av Smart/Speak 32x6.
2. Ta bort eventuella överlägg.
3. Torka apparaten med en lätt fuktad trasa med milt såpa vatten.
4. För att ta bort såpan, fukta en svamp med kallt vatten.
5. Fingerguiden kan skruvas av för rengöring genom att skruva upp de 6 stjärnskruvarna på undersidan.

Skötsel

Smart/Speak 32x6 går automatisk i viloläge efter det att meddelandet har spelats upp. Viloläge är ett aktivt läge som drar lite ström från batterierna. Därför ska Smart/Speak 32x6 slås av om man inte ska använda den på en längre tid (2 – 3 timmar).

Om Smart/Speak 32x6 inte fungerar alls eller inte fungerar som den ska:

1. Kontrollera att batterierna är fulladdade.
2. Kontrollera att Smart/Speak 32x6 är påslagen och att det finns inspelade meddelanden på nivån.
3. Kontrollera att det inte är något som hindrar trycket på meddelande fältet.
4. Stäng av Smart/Speak 32x6 och låt den vara i 15 sekunder, slå på den igen och spela upp ett meddelande.
5. Hjälper inte något av detta, kontakta Falck Igel, tlf. 08-6956940.

Tech Overlay Designer og Tech/Syms Series I, II & III

Installation av Tech Overlay Designer

1. Sätt in Resource CD 2009
2. Programmet ska starta automatisk, om det inte gör det klicka på startknappen och välj ”kör...”
Skriv in ”D:\autorun.exe” och tryck Enter. (”D:\” är exempel på CD station. Den kan vara något annat på din maskinen.)
3. Klicka på ”Tech/Overlay Designer Software” uppe till vänster på skärmen.
4. Klicka därefter på ”Click here to install Tech/Overlay Designer”.
5. Klicka på ”Kör”. Om du får en säkerhetsmeddelande tryck på ”kör” igen.
6. Klicka på ”Next >”
7. På License Agreement, klicka på I Agree och klicka på ”Next >”.
8. I ”Customer information” är ”Name” valfritt, men Serial number: **1A11A – 77777 – AA11A – 77777 – A1A1A** måste läggas in. Klicka på ”Next >” när det är gjort.
9. I ”Select installation folder” MÅSTE **Everyone** väljas. Klicka på ”Next >” 2 gånger.
10. Programmet installeras nu på din PC. Klicka på ”Close” när installationen är färdig.

Installation Tech/Syms Series

1. Klicka på ”Home” uppe i vänstra hörnet på skärmen.
2. Klicka på Tech/Syms – Serie I, II & III för att installera symbolerna.

Series I

1. Klick på ”Click here to install Tech/Syms Series I”.
2. Klicka på ”Kör”. Om du får en säkerhetsmeddelande tryck på ”Kör” igen.
3. Klicka på ”Next >”.
4. I ”Select installation folder” MÅSTE **Everyone** väljas. Klicka på ”Next >” 2 gånger.
5. Klicka på ” I Agree”, klicka på ”Next >”.
6. Nu kan du registrera dig som brukare av Tech/Syms, om du inte önskar det klicka på ”Next >” och klicka därefter på ”Close”.

Series II

1. Klicka på "Click here to install Tech/Syms Series II".
2. Klicka på "Kör". Om du får ett säkerhetsmeddelande klicka på "Kör" igen.
3. Klicka på "Next >".
4. I "Select installation folder" MÅSTE **Everyone** väljas. Klicka på "Next >" 2 gånger.
5. Klicka på " I Agree", klicka på "Next >".
6. Nu kan du registrera dig som brukare av Tech/Syms, om du inte önskar det klicka på "Next >" och på "Close".

Series III

1. Klicka på "Click here to install Tech/Syms Series III".
2. Klicka på "Kör". Om du får ett säkerhetsmeddelande klicka på "kör" igen.
3. Klicka på "Next >".
4. I "Select installation folder" MÅSTE **Just me** väljas. Klicka på "Next >" 2 gånger.
5. Klicka på " I Agree", klicka på "Next >".
6. Nu kan du registrera dig som brukare av Tech/Syms, om du inte önskar det klicka på "Next >" och på "Close".

Starta programmet

Klicka på Tech Overlay Designer ikonen på skrivbordet.

Välj en mall

1. Klicka på ▼ under FILE i menyn på toppen. Det kommer nu att visas en lista över de olika mallarna..
2. Välj mallen Smart/Scan 32.
3. Den nya mallen visas nu på skärmen.

**OBS! Hålen som anger nivån visas först när överlägget visas i förhandsvisning.
(Print preview i File menyn).**

Lägga in en symbol eller bild i ett av fälten på överlägget

1. Klicka på det fältet på överlägget där bild/symbol ska placeras, fältet blir nu markerat men en röd ram.
2. Klicka på INSERT överst i menyn. Det kommer nu upp en lista med val Text och Image.
3. Klicka på Image. Det kommer nu att visas ett nytt fönster. Klicka på den stationen som bilderna är lagrade på. Tech/Syms symbolerna är lagrade på C-stationen.
4. Dubbelklicka på foldern med bilderna/symbolerna. Tech/Syms symbolerna är lagrade i foldern Tech/Syms.
5. När man klickar på en av symbolerna kommer det att visas i fältet märkt "Preview". Markera den bild/symbol som önskas. Klicka sedan på "Insert".
6. Bilden är nu inlagd på fältet för överlägget.

Ändra bakgrundsfärg

1. Klicka på det fältet, som bakgrundsfärgen ska ändras på. Fältet blir markerat med en röd ram.
2. Klicka på en av färgerna i färg menyn ”Color”. Bakgrunden i fältet kommer nu att få samma färg. Om färg menyn inte visas, klicka på View överst i menyn och klicka sedan på ”Color”.

Ändra storleken eller rotera en bild/symbol

1. Klicka på mitten av bilden/symbolen. Bilden/symbolen blir nu markerad med en röd ram.
2. Klicka på Image överst i menyn, en lista med valen Resize X or Y, Resize X and Y, Rotate 180, Rotate 90 CW, Rotate 90CCW, Flip Horizontal og Flip Vertical.
3. Klicka på det val som önskas och på den bild/symbol som ska ändras.
4. Om du väljer Resize X or Y eller Resize X and Y, kommer det, när du för muspekaren över hörnet i den röda ramen runt bilden/symbolen, visas en 2-vägs pil. Om vänster musknapp trycks och hålls nere kan storleken på bilden/symbolen ändras.

Ändra placeringen av en bild, symbol eller text

1. Håll muspekaren över bilden/ symbolen, tryck ner vänster musknapp och håll knappen nere.
2. En 4-vägs pil kommer att visas, när bilden/ symbolen eller texten flyttas runt inne i fältet.
3. Ändra texten.
4. Dubbelklicka på texten i bilden/symbolen. Den blir markerad med blå bakgrund
5. Nu kan ny text skrivas in. Klicka på utsidan av textfältet när du är färdig.

Ändra teckensnittet

1. Klicka på texten i fältet, den blir markerad med en röd ram.
2. Klicka på Text överst i menyn. En lista med valen Font och Align kommer att visas.
3. Klicka på Font. Ett nytt fönster där man kan välja teckensnitt, stil och teckenstorlek.
4. Välj teckensnitt, stil och teckenstorlek och klicka OK.

Ändra placeringen av texten i textfältet

1. Klicka på texten i fältet, den blir markerad med en röd ram.
2. Klicka på Text överst i menyn. En lista med valen Font och Align kommer att vis.
3. Klicka på Align. En lista med valen Left, Right og Center kommer att visas.
4. Klicka på önskad justering.

Ändra visningsstorleken på överlägget

1. Klicka på View överst i menyn. En lista med procentvärden kommer att visas.
2. Klicka på önskad storlek i procent. (Standard är 100 %).

Radera en bild/ symbol eller text

1. Klicka på bilden/symbolen eller texten. Den blir markerad med en röd ram.
2. Tryck på Delete på tangentbordet eller klicka på Edit i menyn på toppen och välj Delete.

Skriva ut ett överlägg

1. Klicka på File överst i menyn och välj Select Printer & Page Setup, ett nytt fönster kommer att visas.
2. Klicka på Skriv ut och välj önskad skrivare i fönstret som kommer upp. Här rekommenderas att använda en skrivare som kan skriva ut A3 format. Klicka på OK när skrivaren är vald.
3. Välj pappersstorlek genom att trycka på ▼ till höger om storleksfältet. Välj A3 eller A4 format. Väljs A4 format kommer överlägget att skrivas ut på två A4 sidor och man måste klippa och klistra de två arken samman för att få hela överlägget i ett stycke.
4. Klicka på OK.
5. Klicka på File överst i menyn och välj Print, klicka på OK på meddelandet som kommer upp.
6. Överlägget skrivs nu ut.

Spara överlägget


1. Klicka på File överst i menyn på och välj Save.
2. Skriv in önskat namn på överlägget. Överlägget lagras i foldern;
C:\Program files\AMDI\Tech Overlay Designer\Overlays.

Öppna ett överlägg


1. Klicka på File överst i menyn och välj Open.
2. Markera önskat överlägg och klicka på Öppna/Open.

Laminera ett överlägg


1. Klipp längs kanten på det utskrivna överlägget. OBS! Det är viktigt att vänstra och nedersta kanten av överlägget klipps noggrant, om inte kommer inte nivå hålen placeras rätt i förhållande till sensorerna i Smart/Speak 32x6.

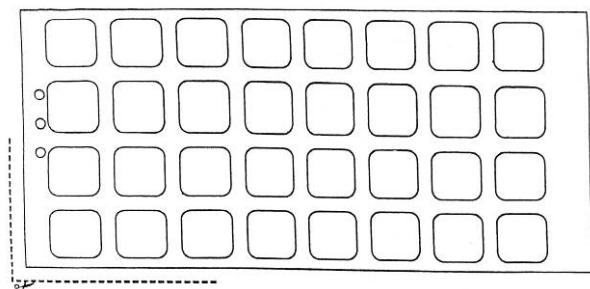



2. Laminera överlägget

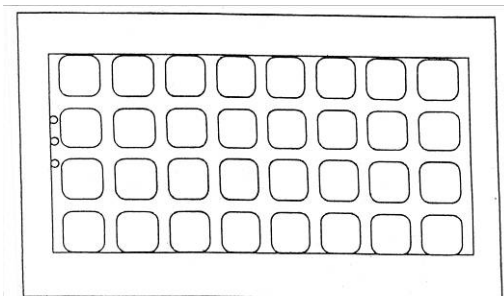


3. Använd hålmaskinen för att stansa ut i förhållande till önskad nivå.
Om ett hål stansas ut lite fel, kan det korrigeras genom att stansas ut igen en gång till.
Men hålen får inte gå över i varandra eller över kanten på överlägget.

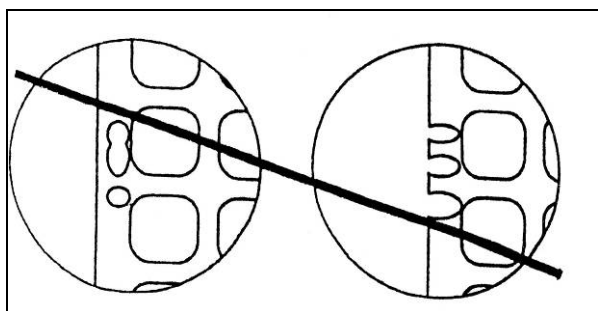

4. Placera överlägget över det laminerade överlägget. Se till att hålen i det laminerade överlägget ligger på rätt sätt i förhållande till hålen på mallen och att den nedre och vänstra kanten på överlägget och mallen stämmer överrens. Rita ett sträck längs kanten på mallen.

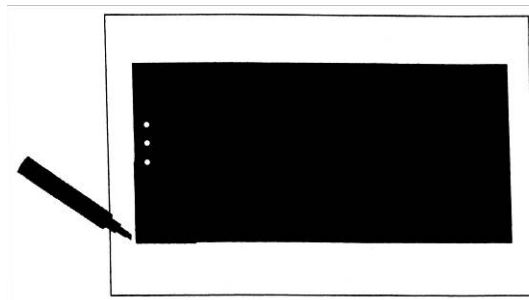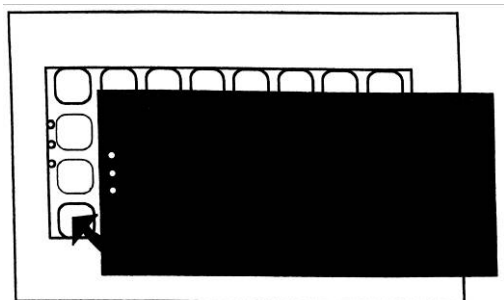

5. Klipp längs sträcket. OBS! Det är viktigt att den vänstra och nedersta kanten av överlägget klipps noggrant, om inte kommer inte nivå hålen placeras rätt i förhållande till sensorerna i Smart/Speak 32x6.

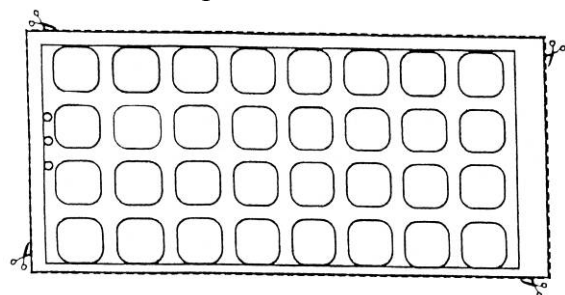

Säkerhet

Falck Igel AB har utarbetat riskanalys för produkten med hänvisning till NS-EN 1441 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som är gjorda i detta dokument.

Vid drifttagning och dagligt bruk av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du har tagit produkten korrekt i drift eller ställt in den rätt önskar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följdskador eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB's ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.

Det är inte tillåtet att kopiera denna bruksanvisning utan skriftlig tillåtelse från Falck Igel AB.

Har du problem med hjälpmedlet, ring 08-695 69 40.

Falck Igel AB

Stockholm

Liljeholmsvägen 30 B
117 61 Stockholm
Tlf (+46) 8 695 69 40
Fax (+46) 8 695 69 49

Gävle – Dalarna

Tlf. (+46) 8 695 69 44
Tlf. (+46) 8 695 69 45

Lund

Tlf. (+46) 8 522 231 42

falckigel@falckigel.se
www.falckigel.se
