

# Bruksanvisning för Tech Talk 8x6

Art.nr.: 463 804



Version juli 2009



## Innehåll

Lycka till med din TechTalk 8x6.....	4
Användning: .....	4
Sätta i batterier.....	4
Indikator för låg batterinivå .....	4
Spela in meddelande: .....	5
Spela upp meddelande .....	5
Val av nivå .....	5
Överlägg .....	5
Underhåll .....	6
Tech Overlay Designer och Tech/Syms Series I, II & III .....	6
Installation av Tech Overlay Designer .....	6
Installation Tech/Syms Series.....	6
Starta programmet .....	7
Välj en mall.....	7
Lägga in en symbol eller bild i ett fält på överlägget .....	7
Ändra bakgrundsfärgen .....	8
Ändra storleken eller rotera bilden/symbolen.....	8
Ändra placering av en bild, symbol eller text.....	8
Ändra texten.....	8
Ändra på teckensnittet .....	8
Justering av texten i textfältet .....	8
Ändra visningsstorleken på överlägget.....	8
Radera en bild/symbol eller text .....	9
Skriv ut ett överlägg.....	9
Spara överlägget .....	9
Öppna ett överlägg.....	9
Laminering av överlägg .....	9
Säkerhet .....	10

## Lycka till med din TechTalk 8x6

TechTalk 8x6 är ett enkelt kommunikationshjälpmedel som designats för att vara pålitligt och av god kvalitet. Detta för att Tech Talk 8x6 ska tåla många års användning.

### Egenskaper för TechTalk 8x6

- Skyddad mot stötar, tål hård behandling.
- Vattentålig, lätt att rengöra.
- Inkapslingen är gjord av kraftig stöttålig plast.
- Bärbar och lätt.
- Inspelat tal kan lagras över lång tid, även utan ström.
- Indikator för låg batterinivå.
- Tech Talk 8x6 har inbyggd mikrofon, inbyggda högtalare. 4 ingångar och 4 utgångar för anslutning för externa högtalare och inspelningsbrytare.
- 6 nivåer med 8 fält på varje nivå för inspelning av meddelanden.
- Överlägg som går att skriva ut.

### Produkten levereras med:

- TechTalk 8x6
- Tech Overlay Designer CD. **OBS!** Tech Overlay Designer är inte Windows Vista kompatibel.
- 4 stycken 1,5V LR6 Alkaline batterier.
- Bärrem.
- Bruksanvisning(denna).

## Användning:

TechTalk 8x6 är enkel att använda. Det är bara att skruva på den och justera volymen till önskad styrka, välja nivå, trycka på den önskade bilden och det inspelade meddelandet kommer att spelas upp.

Alla inställningar och anslutningar är placerade på baksidan av TechTalk 8x6.

På TechTalk 8x6 kan det spelas in och spelas upp 8 meddelanden på varje nivå av de 6 nivåerna.

Varje meddelande kan vara upp till 4,5 sekunder. Överlägget (bildkorten) kan lätt bytas ut genom att trä den i springan på sidan mellan fingerguiden och apparaten.

## Sätta i batterier

1. Se till att Tech Talk 8x6 J är avskruvad. Skruva OFF/VOL moturs helt tills ett klick hörs.
2. Vänd Tech Talk 8x6 runt och lägg den med framsidan ned på ett slätt underlag.
3. Skruva av batterilocket nederst i vänstra hörnet.
4. Avlägsna de gamla batterierna. Använda batterier får inte kastas tillsammans med vanligt avfall.
5. Sätt i 4 nya batterier. Se till att de placeras rätt med polariteten.
6. Skruva på batterilocket igen, se till att det skruvas på ordentligt.

## Indikator för låg batterinivå

1. Indikatorn för låg batterinivå/Inspelningsindikatorn sitter nederst till höger på framsidan av TechTalk 8x6.
2. När batterinivån är låg kommer denna lampa att blinka.

## Spela in meddelande:


OBS: Det är viktigt att den inbyggda mikrofonen på baksidan inte övertäcks under inspelning.

1. Slå på TechTalk 8x6. Skruva OFF/VOL medurs tills det hörs ett klick och skruva den vidare till den står i mittläge.
2. Tryck och håll både REC-knappen (se bilden nedanför) och det meddelandefält som det ska spelas in meddelande på.
3. När inspelningsindikatorn, placerad nederst till höger på framsidan av TechTalk 8x6, börjar lysa kan meddelande läsas in i den inbyggda mikrofonen. Mikrofonen är placerad vid sidan av inspelningsindikatorn. Läs in med ett avstånd på 15-20 cm till mikrofonen. Inspe­lingen bör göras i ett tyst rum.
4. När inspe­lingen är klar, släpps REC-knappen och meddelandefältet.
5. Detta måste göras för alla de 8 meddelandefälten på alla 6 nivåerna.

## Spela upp meddelande

Om det ska användas en extern högtalare, kopplas denna till utgången märkt EXT SPK.

1. Slå på TechTalk 8x6. Skruva OFF/VOL medurs tills det hörs ett klick och skruva den vidare till önskad ljudnivå.
2. Vrid nivåbrytaren till rätt nivå.
3. Tryck på önskat meddelandefält och det inspelade meddelandet spelas upp.

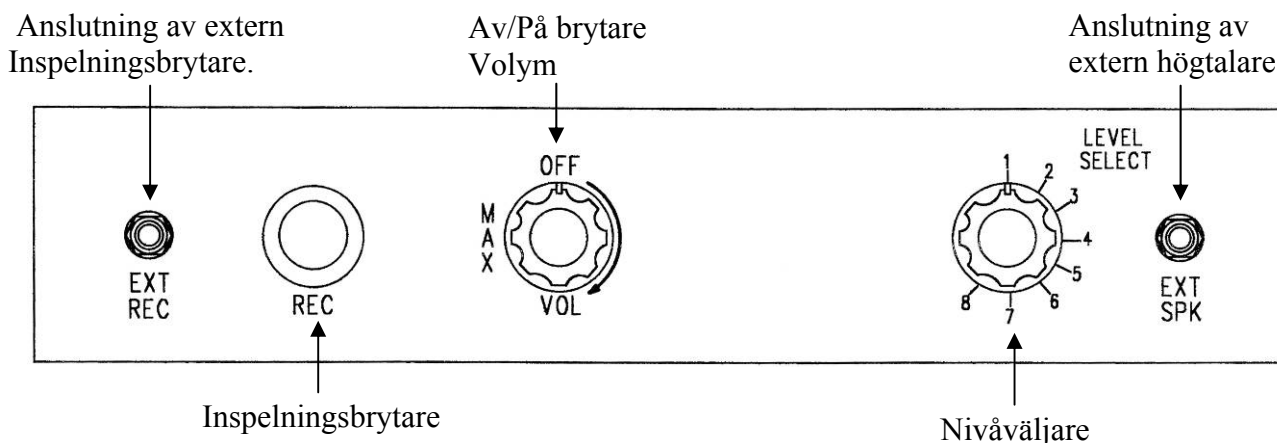

## Val av nivå

Det är 6 nivåer på TechTalk 8x6.

För att välja nivå 1, vrid nivåväljaren till 1. För att välja nivå 2, vrid nivåväljaren till 2 osv.

## Överlägg

Det finns flera olika sätt att tillverka överlägg till TechTalk 8x6.

1. Rita eller skriv ett ark som är 15,2 x 34 cm. Placera varje fält så att det passar in i de 8 fälten på TechTalk 8x6.
2. Tillverka dina egna överlägg med Tech Overlay Designer och Tech/Syms symboler. Blanka mallar ligger på RESOURCE CD 2009.
3. Gör dina egna överlägg med Mayer-Johnson Boardmaker. Boardmaker måste köpas separat. Blanka mallar kan laddas ner från vår hemsida [www.falckigel.se](http://www.falckigel.se) under ladda ned.

## Underhåll

TechTalk 8x6 går automatisk i viloläge efter att ett meddelande har spelats upp. Viloläge är ett aktivt läge som drar lite ström ifrån batterierna. Därför bör man stänga av TechTalk 8x6 om den inte ska användas på en längre tid (2 – 3 timmar).

Om TechTalk 8x6 inte fungerar alls eller inte fungerar som den ska:

1. Kontrollera att batterierna sitter i på rätt sätt.
2. Kontrollera att TechTalk 8x6 är påslagen och att det finns inspelade meddelande. Kontrollera också att det inte är något som hindrar trycket på meddelandefälten.
3. Stäng av TechTalk 8x6 och låt den vara av i 15 sekunder, slå på den igen och spela upp ett meddelande.
4. Byt ut batterierna.
5. Hjälper inte något av detta, kontakta Falck Igel tlf: 08-6956940.

## Tech Overlay Designer och Tech/Syms Series I, II & III

### Installation av Tech Overlay Designer

1. Sätt in Resource CD 2009
2. Programmet ska starta automatisk, om det inte gör det klicka på startknappen och välj ”Kör..”  
Skriv in ”D:\autorun.exe” och tryck Enter. (”D:\” är exempel på en CD station. Denna kan heta något annat på din maskin) Klicka på ”Tech/Overlay Designer Software” överst till på skärmen.
3. Klicka därefter på ”Click here to install Tech/Overlay Designer”.
4. Klicka på ”Kör”. Om du får ett säkerhetsmeddelande tryck på ”kör” igen.
5. Klicka på ”Next >”
6. På License Agreement, klicka på  I Agree och klicka på ”Next >”.
7. I ”Customer information” är ”Name” valfritt, men Serie nummer: **1A11A – 77777 – AA11A – 77777 – A1A1A, MÅSTE LÄGGAS IN.** Klicka därefter på ”Next >”.
8. I ”Select installation folder” **MÅSTE**  **Everyone** väljas. Klicka på ”Next >” 2 gånger.
9. Programmet installeras nu på din PC. Klicka på ”Close” när installationen är färdig.

### Installation Tech/Syms Series

1. Klicka på ”Home” överst på skärmens vänstra hörn.
2. Klicka på Tech/Syms – Serie I, II & III för att installera symbolerna.

#### Series I

1. Klicka på ”Click here to install Tech/Syms Series I”.
2. Klicka på ”Kör”. Om du ett säkerhetsmeddelande visas på skärmen tryck på ”kör” igen.
3. Klicka på ”Next >”.
4. I ”Select installation folder” **MÅSTE**  **Everyone** väljas. Klicka på ”Next >” 2 gånger.
5. Klicka på ”  I Agree”, klicka på ”Next >”.
6. Nu kan du registrera dig som brukare av Tech/Syms, om du inte önskar det klicka på ”Next >” och sedan på ”Close”.

## Series II

1. Klicka på "Click here to install Tech/Syms Series II".
2. Klicka på "Kör". Om du får ett säkerhetsmeddelande tryck på "Kör" igen.
3. Klicka på "Next >".
4. I "Select installation folder" **MÅSTE**  **Everyone** väljas. Klicka på "Next >" 2 gånger.
5. Klicka på "  I Agree", klicka på "Next >".
6. Nu kan du registrera dig som brukare av Tech/Syms, om du inte önskar det klicka på "Next >" och därefter på "Close".

## Series III

1. Klicka på "Click here to install Tech/Syms Series III".
2. Klicka på "Kör". Om du får ett säkerhetsmeddelande tryck på "kör" igen.
3. Klicka på "Next >".
4. I "Select installation folder" **MÅSTE**  **Just me** väljas. Klicka på "Next >" 2 gånger.
5. Klicka på "  I Agree", klicka på "Next >".
6. Nu kan du registrera dig som brukare av Tech/Syms, om du inte önskar det klicka på "Next >" och sedan på "Close".

## Starta programmet

Klicka på Tech Overlay Designer ikonen på skrivbordet.

## Välj en mall

1. Klicka på ▼ under FILE i menyn överst. Det kommer nu att visas en lista över de olika mallarna.
2. Välj mall Tech/talk (Side).
3. Den nya mallen visas nu på skärmen.

## Lägga in en symbol eller bild i ett fält på överlägget

1. Klicka på det fältet på överlägget där bilden/ symbolen ska placeras, fältet kommer nu bli markerat med en röd ram.
2. Klicka på INSERT överst i menyn. Det kommer nu upp en lista med valen med Text och Image/Bild.
3. Klicka på Image. Det kommer nu att visas ett nytt fönster. Klicka på den stationen som bilderna är lagrade på. Tech/Syms symbolerna är lagrade på C-stationen.
4. Dubbelklicka på den folder som bilden/symbolen ska läggas i. Tech/Syms symbolerna är lagrade i foldern TechSyms.
5. När man klickar på en av symbolerna kommer det att visas i fältet märkt "Preview". Markera den bild/symbol som önskas. Klicka sedan på "Insert".
6. Bilden är nu inlagd på fältet på överlägget.

## Ändra bakgrundsfärgen

1. Klicka på det Fältet, som bakgrundsfärgen ska ändras på. Fältet blir markerat med en röd ram.
2. Klicka på en av färgerna i färgmenyn (märkt Color). Bakgrunden i fältet kommer nu att få denna färg. Om färgmenyn inte visas, klicka på "View" överst i menyn och sedan på "Color".

## Ändra storleken eller rotera bilden/symbolen

1. Klicka på mitten av bilden/symbolen. Bilden/symbolen blir nu markerad med en röd ram.
2. Klicka på Image överst i menyn, en lista med valen Resize X or Y, Resize X and Y, Rotate 180, Rotate 90 CW, Rotate 90CCW, Flip Horizontal och Flip Vertical.
3. Klicka på det val som önskas och bilden/symbolen kommer att ändras på motsvarande sätt.
4. Om du väljer Resize X or Y eller Resize X och Y, kommer det, när du för muspekaren över hörnet i den röda ramen runt bilden/symbolen, visas en 2-vägs pil. Om vänster musknapp trycks och hålls nere kan storleken på bilden/ symbolen ändras.

## Ändra placering av en bild, symbol eller text

1. Håll muspekaren över bilden/symbolen tryck in och håll vänster musknapp nedtryckt.
2. En 4-vägs pil kommer att visas, nu kan bilden, symbolen eller texten flyttas runt inne i fältet.

## Ändra texten

1. Dubbelklicka på texten i bilden/symbolen. Den blir markerad med blå bakgrund.
2. Nu kan ny text skrivas in. Klicka på utsidan av textfältet när du är färdig.

## Ändra på teckensnittet

1. Klicka på texten i fältet, den blir markerad med en röd ram.
2. Klicka på Text överst i menyn. En lista med valen Font/Teckensnitt och Align kommer att visas.
3. Klicka på Font. Ett nytt fönster där man kan välja font typ, stil och bokstavsstorlek.
4. Välj font, stil och bokstavsstorlek och klicka på OK.

## Justering av texten i textfältet

1. Klicka på texten i fältet, den blir markerad med en röd ram.
2. Klicka på Text överst i menyn. En lista med valen Font och Align kommer att visas.
3. Klicka på Align. En lista med valen Left, Right och Center kommer att visas.
4. Klicka på önskad justering.

## Ändra visningsstorleken på överlägget

1. Klicka på View överst i menyn. En lista med procentvärden kommer att visas.
2. Klicka på önskad procent. (Standard är 100 %).

## **Radera en bild/symbol eller text**

1. Klicka på bilden/symbolen eller texten. Den blir markerad med en röd ram.
2. Tryck på Delete på tangentbordet eller klicka på Edit överst i menyn och välj Delete.

## **Skriv ut ett överlägg**

1. Klicka på File överst i menyn och välj Select Printer & Page Setup, ett nytt fönster visas.
2. Klicka på Skrivare och välj önskad skrivare i fönstret som kommer upp. Här rekommenderas att använda en skrivare som kan skriva ut i A3 format. Klicka på OK när skrivaren är vald.
3. Välj pappersstorlek genom att trycka på ▼ till höger om storleksfältet. Välj A3 eller A4 format. Väljs A4 format kommer överlägget att skrivas ut på två A4 sidor och man måste klippa och klistra för att få överlägget i ett stycke.
4. Klick på OK.
5. Klick på File överst i menyn och välj Print, klicka på OK på meddelandet som kommer upp.
6. Överlägget skrivs nu ut.

## **Spara överlägget**

1. Klicka på File överst i menyn på toppen och välj Save.
2. Skriv in önskat namn på överlägget. Överlägget lagras i foldern;  
C:\Program files\AMDI\Tech Overlay Designer\Overlays.

## **Öppna ett överlägg**

1. Klick på File överst i menyn och välj Open.
2. Markera önskat överlägg och klicka på öppna.

## **Laminering av överlägg**

Överläggen kommer att hålla bättre om de lamineras.

## **Säkerhet**

Falck Igel AB har utarbetat riskanalys för produkten med hänvisning till NS-EN 1441 för Medicinsk utrustning. Produktens bruksanvisning och tekniska specifikation är utarbetad med tanke på säkerhetsvärderingarna som är gjorda i detta dokument.

Vid drifttagning och dagligt bruk av produkten är det alltid viktigt att tänka på säkerheten. Det är i en bruksanvisning inte möjligt att beskriva alla sätt man inte ska använda produkten på. Om du är osäker på om du har tagit produkten korrekt i drift eller ställt in den rätt önskar vi att du tar kontakt med din leverantör.

Falck Igel AB är inte ansvarig för eventuella skador, följskador eller förlust som följer av användning, felanvändning, brist på uppföljning, fel inställning, fel uppkoppling eller liknande. Falck Igel AB's ekonomiska ansvar är vid alla tillfällen begränsat till värdet av själva produkten.



---

*Det är inte tillåtet att kopiera  
bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse  
från Falck Igel AB.*

**Vid frågor eller service av  
hjälpmedlet ring till Falck Igel på  
telefon 08 695 69 40**

---

**Falck Igel AB**

Liljeholmsvägen 30B  
S-117 61 Stockholm  
Tel.: 08 695 6940  
Fax: 08 695 6949

**Falck Igel AS, Norge**

Buvikveien 22  
Postboks 123,  
N-4952 Risør  
Tlf: +47 37 14 94 50  
Telefax: +47 37 14 94 70

**E-post:**  
falckigel@falckigel.se  
**Hemsida:**  
www.falckigel.se

---