

BRUKSANVISNING

för

Falck 6918 TM Fall Larm Version TX72SF (SW II)

Art.nr: 324 820



OBS!

*Falck 6918 TM Fall Larm version TX72SF
Ska användas tillsammans med
Falck 6941 TM Trådlös Mottagare version RX70X.*

Version: Jan 06

Innehållsförteckning

Fall Larmet har tre funktioner	3
Programmeringstabell.....	4
Förklaring till Programmeringstabell	4
Programmering av Fall Larm	5
Viktig information	5
Batteribyte.....	6
Säkerhet och underhåll	6
Felsökning.....	6
Egna noteringar.....	7
Tekniska specifikationer.....	8

Fall Larmen har tre funktioner:

- 1 Larm vid tryck på knappen.
- 2 Larm om brukaren faller.
- 3 Larm om brukaren inte är aktiv.

Fall Larmet registrerar att brukaren ligger, (mer än 45 grader)

Larmet har en justering för hur länge brukaren kan stå böjd framåt innan larmet startar att förvarna (piper för att larma brukaren om att det snart sänds ett larm).

Det har justeringar för hur länge brukaren kan ligga ner innan larmet automatisk sänder till Falck 6941 Trådlös Mottagare. Det är skakningsfilter i Fall Larmet så att larmet löser ut själv om brukaren gör stora rörelser när brukaren ligger nere.


Fall Larmet sänder en signal till mottagaren när larmet löser ut, denna heter Falck 6941 Trådlös Mottagare.

Fall Larmet har 100-150 meters räckvidd mellan enheterna vid fri sikt, om utrustningen används i betongbyggnader kommer signalerna reduceras så att räckvidden blir kortare.

Vid leverans står alltid Fall Larmet i programkod 1.

(endast tryckaktivering på larmbrytaren)

För att fallfunktion skall fungera måste Fall Larmet omprogrammeras.

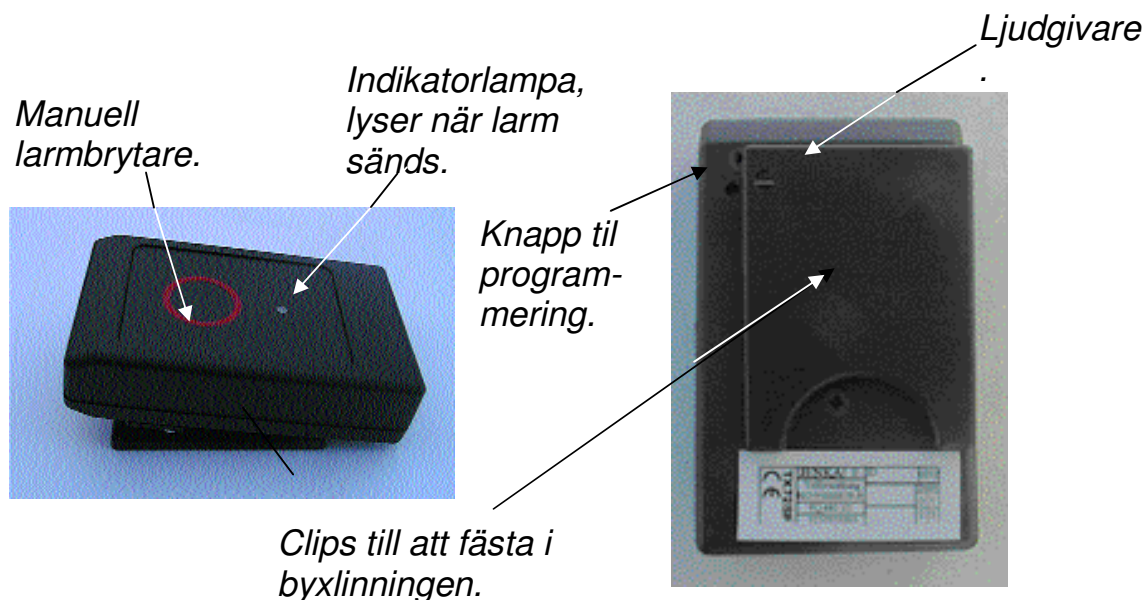

Programmeringstabell

Program kod	Knapp larm	Fall larm	Fall reset	Knapp reset	Väntetid	Inaktiv larm	Ljud aktivt	Förvarn. larm
1	JA						JA	
2	JA	JA	JA	JA	10 sek.		JA	10 sek.
3	JA	JA	JA	JA	20 sek.		JA	30 sek.
4	JA	JA	JA	JA	30 sek.		JA	60 sek.
5		JA		JA	10 sek.		JA	10 sek.
6		JA		JA	30 sek.		JA	30 sek.
7		JA		JA	60 sek.		JA	60 sek.
8	JA	JA	JA	JA	10 sek.	10 min.	JA	10 sek.
9	JA	JA	JA	JA	20 sek.	30 min.	JA	30 sek.
10	JA	JA	JA	JA	30 sek.	60 min.	JA	60 sek.
11						10 min.	JA	10 sek.
12						30 min.	JA	30 sek.
13						60 min.	JA	60 sek.
14	JA	JA	JA	JA	2 sek.		JA	3 sek.

Förklaring til Programmeringstabell:

Program Kod: Detta är olika program som kan användas i Fall Larmen.

Knapp larm: Ett tryck på knappen utlöser larm.

Fall Larm: Fall Larmet löser ut när brukaren ligger ned mer än 45 grader i längre tid än den inställda tiden.

Fall reset: Fall Larmet återställs när Fall Larmet reses upp innan larmet sänts iväg.

Knapp reset: Fall Larmet återställs om larmbrytaren (märket med röd ring) trycks in innan förvarningslarmet har utlöst. När fältet "10" är markerat, kommer Fall Larmet kunna ligga ner i 10 sekunder innan larmtiden startar. Detta är för att ge brukaren tid till att böja sig utan att larmet utlöses.

Inaktivt larm: När program 8 - 13 används, kommer Fall Larmet sända larm efter den tid som är vald om inte brukaren sätter på larmknappen. I denna inställning är det inte krav på att brukaren ligger ned.

Ljud Aktivt: Ljudet i Fall Larmet kommer att vara aktivt i förvarningstiden och när larm sänds. Förvarningslarmet ger pulserande ljud, som går över i kontinuerligt ljud när larm sänds.

Förvarningslarm: Detta är en period i några sekunder, då Fall Larmet förvarnar brukaren med ett ljud om att larm sänds till mottagaren. Avsikten är att undgå falska larm om t.ex. brukaren har lagt sig för att vila.

Programmering:

- 1 Använd en penna för att trycka och hålla in programmeringsknappen på Fall Larmet inne i fem sekunder.
- 2 Fem korta pip indikerar att du är inne i programmeringsläge.
- 3 Släpp programmeringsknappen, en grön lampa tänds på framsidan av Fall Larmet, som indikerar att du är i programmeringsläge.
- 5 Tryck på programmeringsknappen igen så många gånger som program koden du önskar att använda. Det skall pipa för varje tryck. EX.
programkod 2: Tryck två gånger på programmeringsknappen.
- 6 Tryck och släpp brytaren på fronten, fem korta pip hör som kvittering på att programmeringen är godkänd.
- 7 Den gröna lampan på fronten kommer nu att slockna, och programmeringen är färdig.

Viktig information

När du har fått kvittering på att du är inne i programmeringsläge, kommer Fall Larmet gå ur programmeringsläge igen efter 10 sekunder om ingen programmering följer.

Batteribyte:

I Fall Larmet är det som standard ett 9 volt blockbatteri (Alkaliskt, sådant som till en brandvarnare) som kan köpas i en elaffär eller liknande.

Batterierna räcker ca. 8-10 månader, men detta beror på hur ofta som larmet har aktiverats.

Fall Larmet sänder automatiskt larm till mottagaren när batterierna börjar ta slut. Detta för att öka säkerheten så att du skall kunna undgå att tro att utrustningen fungerar när batteriet är slut.

Batteribyte görs genom att skruva upp de 3 skruvarna på baksidan, och lyfta av baksidan. Byt batteriet utan att beröra kretskortet.

Säkerhet och underhåll:

- Batteribyte efter 10 månaders användning eller när larmet sänder automatiskt.
- Hjälpmedlet kan rengöras med en lätt fuktad trasa. Får inte doppas i vatten.
- Testa Falck 6918 TM Fall larm regelmässigt, hur ofta är avgörande för den säkerhetsnivån som eftersträvas på det Fall Larm som används.
- När hjälpmedlet eller batteriet skall kastas, skall det behandlas som specialavfall eller returneras till din leverantör.

Felsökning:

1. Fel: Larm sänds utan att någon funktion är aktiv.
Lösning: Batteriet börjar ta slut, byt enligt ovanstående beskrivning.
2. Fel: Larm utlöses inte på mottagaren om larm aktiveras på Fall Larm.
Lösning: Möjligt att signalerna inte räcker fram. Prova att utlösa larm på närmare avstånd till mottagaren.

Tekniska specifikationer:

Vikt: 130 gram
Mått: 92 x 56 x 23mm
Sändnings frekvens: ----- 439,650 MHz

*Det är inte tillåtet att kopiera
bruksanvisningen utan skriftlig tillåtelse
från Falck Igel AB.*

**Vid frågor eller service av
hjälpmedlet ring till Falck Igel på
telefon 08 695 69 40**

Falck Igel AB

Liljeholmsvägen 30B
S-117 61 Stockholm
Tel.: 08 695 6940
Fax: 08 695 6949

Falck Igel AS, Norge

Buvikveien 22
Postboks 123,
N-4952 Risør
Tlf: +47 37 14 94 50
Telefax: +47 37 14 94 70

E-post:
falckigel@falckigel.se
Hemsida:
www.falckigel.se
